

GEBRAUCHSANWEISUNG

Rumpfbandage

- Sonderanfertigung -

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

Dies Gebrauchsanweisung dient als Ergänzung zu den von unseren Mitarbeitern gegebenen Informationen für Ihr Hilfsmittel.

Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch und kontaktieren Sie uns vor Nutzung, sollten Sie weitere Fragen zu Verwendung haben.

Das Hilfsmittel wurde speziell für Sie von unseren Mitarbeitern gefertigt und vor Abgabe sorgfältig überprüft. Bitte beachten Sie alle gegebenen Hinweise und verwenden Sie das Hilfsmittel nur selbst, und nur für den vorgesehenen Einsatzzweck.

Bitte nutzen Sie das Hilfsmittel nur solange sich dieses in einem technisch einwandfreien und unbeschädigten Zustand befindet. Prüfen Sie dazu, ob das Hilfsmittel sichtbare Schäden aufweist und ob alle Funktionen des Hilfsmittels problemlos funktionieren. Sollte das Hilfsmittel Schäden aufweisen kontaktieren Sie uns oder Ihren Arzt vor Nutzung des Hilfsmittels.

Sollten Probleme bei Verwendung des Hilfsmittels auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt oder an unseren für Sie zuständigen Mitarbeiter.

Gebrauchshinweise:

- Behandeln Sie Ihr Hilfsmittel bitte sorgfältig und nutzen Sie dieses nur selbst und nur für den vorgesehenen Einsatzzweck.
- Prüfen Sie das Hilfsmittel vor jeder Verwendung auf einen einwandfreien Zustand und auf ordnungsgemäße Funktion aller Teile.
- Öffnen Sie alle Klettverschlüsse und legen Sie das Hilfsmittel nach der Vorgabe unseres Mitarbeiters in der Anprobe an.
- Schließen Sie nun nacheinander aller Klettverschlüsse.
- Vermeiden Sie beim Anziehen und Tragen des Hilfsmittels Quetschungen von Haut und Gewebe an den betroffenen Stellen.
- Kontrollieren Sie alle Verschlüsse und den festen Sitz des Hilfsmittels an der vorgesehenen Stelle.
- Schützen Sie das Hilfsmittel gegen zu hohe Temperaturen, Schlägeinwirkungen und Wasser. Nur für ausdrücklich wassertaugliche Hilfsmittel ist direkter Kontakt mit Wasser zulässig.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Rumpfbandage

- Sonderanfertigung –

- Kontrollieren Sie beim Tragen des Hilfsmittels regelmäßig den Zustand der Haut und des umliegenden Gewebes. Achten Sie dabei auf Druckstellen und andere Hautschädigungen.
- Reinigen Sie Ihr Hilfsmittel nach Angabe unserer Mitarbeiter regelmäßig. Achten Sie dabei besonders auf Stellen, die in direkten Kontakt mit dem Hilfsmittel kommen. Achten Sie darauf, dass Sie keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.

Wichtige Hinweise:

- Bei Schäden oder Fehlfunktionen an Ihrem Hilfsmittel verwenden Sie dieses auf keinen Fall ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt oder unserem für Sie zuständigen Techniker!
- Führen Sie an Ihrem Hilfsmittel keine eigenständigen Änderungen oder Reparaturen durch!

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

SEIBT – innovative Orthopädietechnik

Alzeyer Straße 38

55543 Bad Kreuznach