

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### Unterschenkelprothesen

- Sonderanfertigung –

#### Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

Dies Gebrauchsanweisung dient als Ergänzung zu den von unseren Mitarbeitern gegebenen Informationen für Ihr Hilfsmittel.

Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch und kontaktieren Sie uns vor Nutzung, sollten Sie weitere Fragen zu Verwendung haben.

Das Hilfsmittel wurde speziell für Sie von unseren Mitarbeitern gefertigt und vor Abgabe sorgfältig überprüft. Bitte beachten Sie alle gegebenen Hinweise und verwenden Sie das Hilfsmittel nur selbst, und nur für den vorgesehenen Einsatzzweck.

Bitte nutzen Sie das Hilfsmittel nur solange sich dieses in einem technisch einwandfreien und unbeschädigten Zustand befindet. Prüfen Sie dazu, ob das Hilfsmittel sichtbare Schäden aufweist und ob alle Funktionen des Hilfsmittels problemlos funktionieren. Sollte das Hilfsmittel Schäden aufweisen kontaktieren Sie uns oder Ihren Arzt vor Nutzung des Hilfsmittels.

Sollten Probleme bei Verwendung des Hilfsmittels auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt oder an unseren für Sie zuständigen Mitarbeiter.

#### Gebrauchshinweise:

- Behandeln Sie Ihr Hilfsmittel bitte sorgfältig und nutzen Sie dieses nur selbst und nur für den vorgesehenen Einsatzzweck.
- Prüfen Sie das Hilfsmittel vor jeder Verwendung auf einen einwandfreien Zustand und auf ordnungsgemäße Funktion aller Teile (bei myoelektrischen Prothesen nur vollständig geladene Akkus verwenden).
- Ziehen Sie ggf. erst den Innenschaft und dann den Außenschaft an.
- Achten Sie beim Anziehen der Prothese auf deren richtigen Sitz und richtige räumliche Ausrichtung zum Körper.
- Vermeiden Sie beim Anziehen und Tragen des Hilfsmittels Quetschungen von Haut und Gewebe.
- Legen Sie dann ggf. Haltegurte bzw. Zugbandagen an und kontrollieren Sie deren richtige Lage und Verlauf.
- Kontrollieren Sie alle Verschlüsse und den festen Sitz des Hilfsmittels an der vorgesehenen Stelle. Kontrollieren Sie auch die korrekte Funktion der Haltegurte und Zugbandagen.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### Unterschenkelprothesen

- Sonderanfertigung -

- Schützen Sie das Hilfsmittel gegen zu hohe Temperaturen, Schlageinwirkungen und Wasser. Nur für ausdrücklich wassertaugliche Badeprothesen ist direkter Kontakt mit Wasser zulässig.
- Kontrollieren Sie beim Tragen des Hilfsmittels regelmäßig den Zustand der Haut des Stumpfes und des umliegenden Gewebes. Achten Sie dabei auf Druckstellen und andere Hautschädigungen.
- Führen Sie täglich die Stumpfhygiene und ggf. Stumpfmassage durch.
- Reinigen Sie Ihr Hilfsmittel nach Angabe unserer Mitarbeiter regelmäßig. Achten Sie dabei besonders auf Stellen, die in direkten Kontakt mit dem Hilfsmittel kommen. Achten Sie darauf, dass Sie keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.

#### **Wichtige Hinweise:**

- Bei Schäden oder Fehlfunktionen an Ihrem Hilfsmittel verwenden Sie dieses auf keinen Fall ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt oder unserem für Sie zuständigen Techniker!
- Führen Sie an Ihrem Hilfsmittel keine eigenständigen Änderungen oder Reparaturen durch!

**Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.**

SEIBT – innovative Orthopädietechnik

Alzeyer Straße 38

55543 Bad Kreuznach