

GEBRAUCHSANWEISUNG

Sitzschalen

- Sonderanfertigung –

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

Dies Gebrauchsanweisung dient als Ergänzung zu den von unseren Mitarbeitern gegebenen Informationen für Ihr Hilfsmittel.

Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch und kontaktieren Sie uns vor Nutzung, sollten Sie weitere Fragen zu Verwendung haben.

Das Hilfsmittel wurde speziell für Sie von unseren Mitarbeitern gefertigt und vor Abgabe sorgfältig überprüft. Bitte beachten Sie alle gegebenen Hinweise und verwenden Sie das Hilfsmittel nur selbst, und nur für den vorgesehenen Einsatzzweck.

Bitte nutzen Sie das Hilfsmittel nur solange sich dieses in einem technisch einwandfreien und unbeschädigten Zustand befindet. Prüfen Sie dazu, ob das Hilfsmittel sichtbare Schäden aufweist und ob alle Funktionen des Hilfsmittels problemlos funktionieren. Sollte das Hilfsmittel Schäden aufweisen kontaktieren Sie uns oder Ihren Arzt vor Nutzung des Hilfsmittels.

Sollten Probleme bei Verwendung des Hilfsmittels auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt oder an unseren für Sie zuständigen Mitarbeiter.

Gebrauchshinweise:

- Behandeln Sie Ihr Hilfsmittel bitte sorgfältig und nutzen Sie dieses nur selbst und nur für den vorgesehenen Einsatzzweck.
- Prüfen Sie das Hilfsmittel vor jeder Verwendung auf einen einwandfreien Zustand und auf ordnungsgemäße Funktion aller Teile.
- Sitzschalen zur Verwendung mit einem Untergestell dürfen ausschließlich mit dem dafür zugelassenen / gelieferten Untergestell verwendet werden.
- Das Aufsetzen und Abnehmen der Sitzschale auf das Untergestell darf nur ohne Patient erfolgen.
- Direkt nach dem Besetzen der Sitzschale ist die korrekte Lagerung von Kopf, Rumpf, Becken, Beinen sowie Armen zu kontrollieren. Zum Anpassen können ggf. Erhöhungskeile verwendet werden.
- Bei Abwesenheit der betreuenden Person schließen Sie die Halte- und Fixierungsgurte. Achten Sie darauf diese nicht zu fest anzuziehen und vermeiden Sie Falten in der Kleidung.
- Ein Transport im Auto ist in der Sitzschale nur mit entsprechendem Adapter und zugelassenen Rückhaltesystemen zulässig. Zum Transport im Auto den Fixierungsgurt straff um die Rückenlehne und den Dreipunktgurt um den Körper legen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Sitzschalen

- Sonderanfertigung -

Kontrollieren Sie direkt im Anschluss den Gurtverlauf.

- Schützen Sie die Sitzschale vor zu hohen Temperaturen, Schlägeinwirkungen und Wasser. Nur für ausdrückliche Badesitzschalen ist direkter Wasserkontakt zulässig.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Haut und achten Sie dabei auf Hautverfärbungen und Druckstellen.
- Reinigen Sie Ihr Hilfsmittel nach Angabe unserer Mitarbeiter regelmäßig. Achten Sie dabei besonders auf Stellen, die in direkten Kontakt mit dem Hilfsmittel kommen. Achten Sie darauf, dass Sie keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden. Die abnehmbaren Bezüge können bei 30° gewaschen werden.

Wichtige Hinweise:

- Bei Schäden oder Fehlfunktionen an Ihrem Hilfsmittel verwenden Sie dieses auf keinen Fall ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt oder unserem für Sie zuständigen Techniker!
- Führen Sie an Ihrem Hilfsmittel keine eigenständigen Änderungen oder Reparaturen durch!

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

SEIBT – innovative Orthopädietechnik

Alzeyer Straße 38

55543 Bad Kreuznach